



CAREPUR

For a human life.

POSITIONIERUNGS- RATGEBER

**Informationen für Pflegekräfte
und pflegende Angehörige**



INHALTS VERZEICHNIS

| | | | |
|-------------------------------|---------|---|---------|
| 1 Vorwort | 3 - 4 | 9 Produktübersicht | 40 - 43 |
| 2 Der ganze Körper | 5 - 11 | CAREPUR Beinpositionierungsset | 40 |
| 3 Der Kopf | 12 - 13 | CAREPUR Beinpositionierung | |
| 4 Der Oberkörper | 14 - 15 | Kompakt | 41 |
| 5 Die Arme | 16 - 17 | CAREPUR Positionierungsset I | 42 |
| 6 Die Beine | 18 - 26 | CAREPUR Positionierungsset II | 43 |
| komplette untere Extremität | 18 - 19 | 10 Weitere Produkte | 44 - 45 |
| Knie | 20 - 21 | Matratzen | 44 |
| Unterschenkel | 22 - 24 | Sitzkissen | 45 |
| Fersenfreilagerung | 25 - 26 | 11 Fremdwortverzeichnis | 46 |
| 7 Mikrolagerung | 27 - 28 | 12 Material, Reinigungshinweise, Impressum | 47 |
| 8 Im Rollstuhl | 29 - 30 | | |
| 9 Produktübersicht | 31 - 39 | | |
| Textilbezüge | 31 | | |
| Seitenlagerungskissen | 32 | | |
| Universalkissen, Deltakissen, | | | |
| Halbmondkissen | 33 | | |
| Semi-Fowler-Kissen | 34 | | |
| Zylinderkissen, Ringkissen, | | | |
| Abduktionskissen | 35 | | |
| Fersenfreilagerung | 36 | | |
| Fersenentlastungsgurt, | | | |
| Hemi-Armkissen | 37 | | |
| Rückenlagerungskissen | 38 | | |
| Mikrolagerung, | | | |
| Universallagerungsset | 39 | | |



Service- und Bürozeiten

Mo.-Fr.: 7.³⁰ Uhr - 17.⁰⁰ Uhr

Telefon: +49 33678 - 40 77 00

Telefax: +49 33678 - 40 77 29

E-Mail: info@s-h-p.eu

Web: www.s-h-p.eu



Personen, die sich täglich um Menschen mit Pflegebedarf kümmern, übernehmen ein großes Spektrum verschiedener Aufgaben, um den Bedürfnissen und Anforderungen der zu pflegenden Person gerecht zu werden. Die Erhaltung und Förderung der Mobilität in Verbindung mit der Prophylaxe von Dekubitalulzerationen ist eine dieser Aufgaben, die in dieser Broschüre betrachtet werden soll. Die Wahl der richtigen Hilfsmittel, die sowohl beim Pflegebedürftigen Wohlbefinden auslösen als auch dem Pflegenden die Arbeit erleichtern, spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Eine neue Erfahrung

Immobilität und die Abhängigkeit von Pflegekräften im Bereich Bewegung ist für viele Patienten/Bewohner eine existenzielle Erfahrung, der mit Einfühlungsvermögen und Verständnis seitens der Pflegenden begegnet werden muss.

Die Intervalle zwischen den Bewegungsförderungen bzw. Positionsveränderungen sind abhängig von:

- dem individuellen Dekubitusrisiko des Patienten/Bewohners,
- den therapeutischen und pflegerischen Zielen,
- den individuellen Möglichkeiten und der Eigenbewegung des Patienten/Bewohners.

Die richtigen Hilfsmittel nutzen

Druckverteilende Hilfsmittel reduzieren die auf ein bestimmtes Areal einwirkende Belastung. Jeder Patient/Bewohner bringt andere Voraussetzungen in die pflegerische Situation mit ein (u. a. körperliche und psychische Konstitution). Diese müssen bei der Auswahl des geeigneten Hilfsmittels berücksichtigt werden.

Die einzusetzenden Hilfsmittel zur Druckverteilung sollen nach folgenden Kriterien ausgewählt werden:

- den prioritären Pflege- und Therapiezielen,
- den Möglichkeiten der Eigenbewegung des Patienten/Bewohners,
- den gefährdeten Körperstellen,
- dem Gewicht des Patienten/Bewohners,
- den Präferenzen und Wünschen des Patienten/Bewohners,
- der Abwägung von Kosten und Nutzen.

VORWORT



Dekubitusgefährdete Patienten/Bewohner müssen unverzüglich nach der Risikoerkennung eine entsprechende Prophylaxe – primär eine Druckentlastung (z. B. Positionswechsel, Bewegungsförderung) – erhalten. Ist die Druckentlastung nicht möglich bzw. nicht ausreichend, sollten ergänzend druckverteilende Hilfsmittel eingesetzt werden.

Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe müssen regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Ziel der prophylaktischen Maßnahmen ist die Vermeidung des Auftretens von Dekubitus.

i

Produktlinie zur Patientenpositionierung



CAREPUR-Lagerungskissen sind als statische Positionierungshilfen für Leib, Rumpf und Extremitäten sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für die Dekubitustherapieunterstützung geeignet. Sie wirken nach dem Weichlagerungs-, Umlagerungs- bzw. Freilagerungsprinzip und unterstützen je nach Kissentyp bei der Lagerung und Positionierung besonders gefährdeter Körperteile bzw. Körperregionen.



Eine pflegerische Unterstützung der Positionswechsel bis hin zur vollständigen pflegerischen Übernahme der Durchführung ist dann erforderlich, wenn Patienten/ Bewohner nicht mehr in der Lage sind, selbstständig für eine regelmäßige Druckentlastung zu sorgen bzw. die von ihnen ausgeführten Bewegungen keine ausreichende Druckentlastung bieten (Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege vom DNQP, 2. Aktualisierung).


Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Positionierungsunterstützung in Rückenlage, in 30°-40° seitlicher Lagerung rechts oder links und 135°-Lagerung.

Die individuelle Positionierung kann dabei entweder mit nur einem Positionierungskissen oder durch sinnvolle Kombination verschiedener Kissen erfolgen, um den gesamten Körper sicher und lagestabil zu positionieren und bestimmte Bereiche des Körpers explizit freizulagern.

Seitenlagerungskissen M

30°-Lagerung

Das Seitenlagerungskissen erhöht den Oberkörper und die Hüfte einseitig. Oberschenkel, Knie und Unterschenkel derselben Seite werden wirksam gestützt und eine Freilagerung der Ferse ermöglicht.

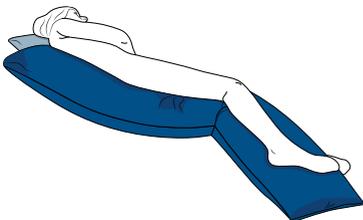

Rückenlagerungskissen M

30°-Lagerung

Auch das Rückenlagerungskissen ermöglicht eine lagestabile seitliche Positionierung.




Der ganze Körper



Seitenlagerungskissen M

135°-Lagerung


Das Seitenlagerungskissen eignet sich ebenfalls für die Durchführung einer 135°-Lagerung, bei der der Patient/Bewohner durch die Positionierungshilfe sicher gestützt wird und die Sakralregion komplett freigelagert wird.

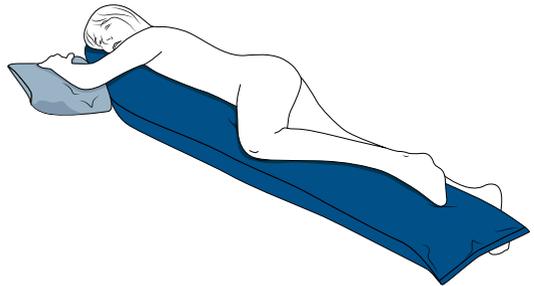

Rückenlagerungskissen M

Rückenlagerung

Die Anwendung des Rückenlagerungskissens bewirkt eine Unterfütterung, Weichlagerung und Positionierung des gesamten Körpers und ermöglicht die Freilagerung individuell definierter Bereiche zur lokalen Druckreduzierung.

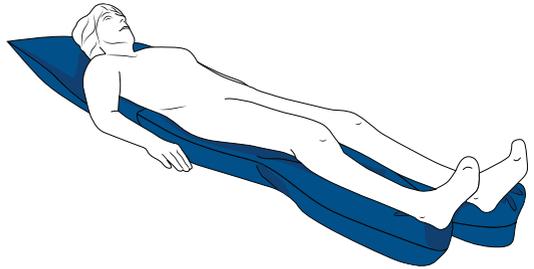

Die bisher beschriebenen Positionierungsmöglichkeiten sind auch durch die Kombination verschiedener CAREPUR-Lagerungskissen möglich. Im Folgenden zeigen wir Ihnen exemplarisch individuelle Kombinationsbeispiele.


Der ganze Körper



Universalkissen S, Deltakissen M, Universalkissen M

30°-Lagerung


Rücken und Becken werden vom Deltakissen gestützt, der Kopf vom Universalkissen S sicher positioniert, die Knie durch ein Universalkissen M abduziert und der erhöht positionierte Unterschenkel weich gelagert.

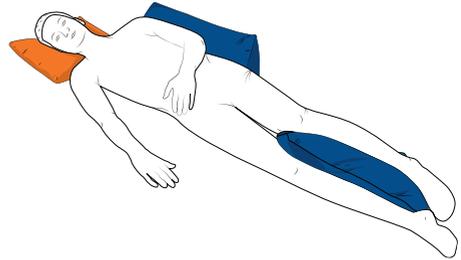

Universalkissen S, Zylinderkissen M, Universalkissen M

30°-Lagerung


Das Zylinderkissen stützt Rücken und Becken in der seitlichen Positionierung und das Universalkissen lagert das komplette Bein weich und die Ferse frei.

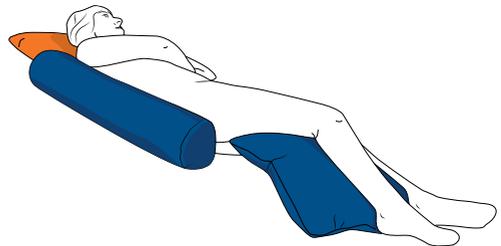

Universalkissen S, Halbmondkissen M, Fersenfreilagierung M

30°-Lagerung

Das Halbmondkissen wirkt stützend im Rücken- und Beckenbereich, positioniert den Oberschenkel und sorgt für eine sichere Abduktion im Kniebereich.

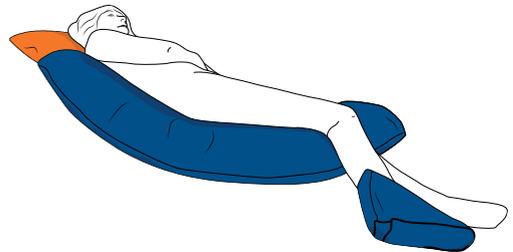


Der ganze Körper



Universalkissen S, Universalkissen M, Zylinderkissen M, Fersenfreilagierung M

30°-Lagerung

Der Rücken wird durch ein Universal-kissen M gestützt, das oben liegende Bein durch ein Zylinderkissen sicher positioniert sowie Außenknöchel und Ferse des unteren Fußes durch die Fersenfreilagierung geschützt.

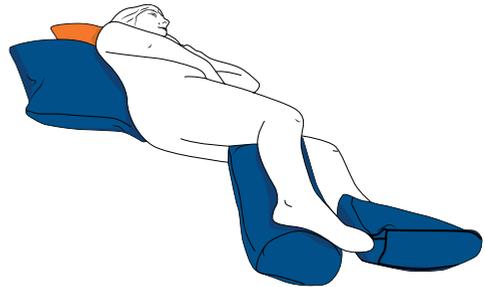

Halbmondkissen M, Semi-Fowler-Kissen M, Fersenentlastungsgurt

Rückenlagerung

Bei dieser Anwendung führt das Semi-Fowler-Kissen die Oberschenkel, unterfüttert die Knie, gewährleistet eine Abduktion im Kniebereich und entlastet so den Sakralbereich. Das Halbmondkissen stützt Kopf und Oberkörper und fördert die Eigenwahrnehmung des Patienten.




Der ganze Körper



Semi-Fowler-Kissen M, Abduktionskissen M, Zylinderkissen M, Fersentlastungsgurt

Rückenlagerung


Die Unterfütterung und leichte Winkelung der Knie wird durch ein Zylinderkissen M erreicht, die Fersen durch einen Entlastungsgurt freigelagert.

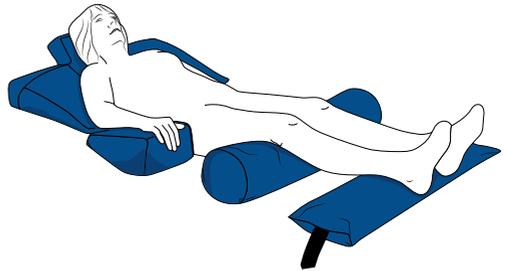

Semi-Fowler-Kissen M, Universalkissen S, Abduktionskissen M, Universalkissen M, Zylinderkissen M

Rückenlagerung

Hier wird die Positionierung in Rückenlage durch fünf unterschiedliche CAREPUR-Lagerungskissen unterstützt.

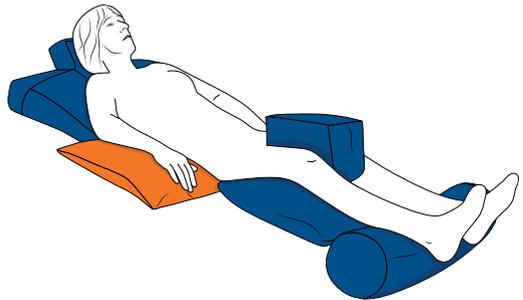


Der ganze Körper



Semi-Fowler-Kissen M, Universalkissen S, Deltakissen M, Fersenentlastungsgurt

Rückenlagerung


Mit dem Semi-Fowler-Kissen werden Kopf und Schultern positioniert. Das Deltakissen unterfüttert die Beine, entspannt die Bauchmuskulatur und entlastet den Sakralbereich. Die Fersen werden vom Entlastungsgurt freigelagert und ein Arm vom Universalkissen S erhöht positioniert und weichgelagert.

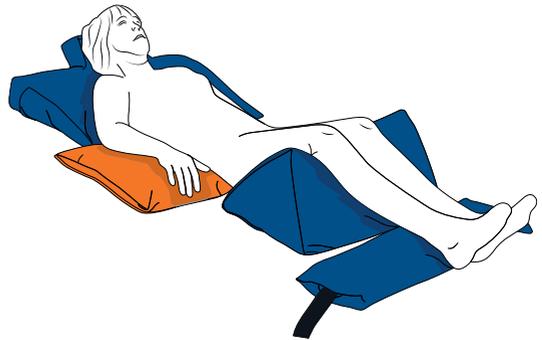

Universalkissen S, Universalkissen M, Zylinderkissen M

135°-Lagerung

Das Universalkissen M stützt den Oberkörper des Patienten/ Bewohners thorakal ab und durch das Zylinderkissen wird das leicht angewinkelte Bein sicher positioniert.

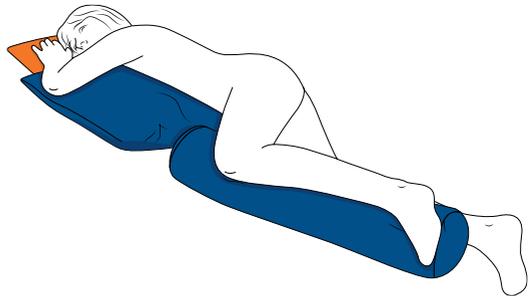


Der ganze Körper



Universalkissen S, Deltakissen M, Zylinderkissen M

135°-Lagerung


Hier erfolgt die Abstützung im Brust- und Bauchbereich durch ein Deltakissen M. Das oben liegende Bein wird durch ein Zylinderkissen M sicher und lagestabil positioniert.

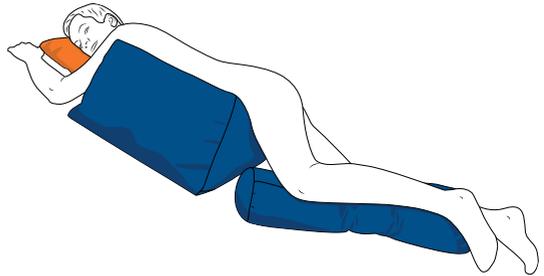

Zylinderkissen S, Halbmondkissen M

135°-Lagerung

Das Halbmondkissen kann auch bei der Durchführung der 135°-Lagerung Anwendung finden. Es stützt thorakal und positioniert das Bein. Der Kopf wird durch ein Zylinderkissen S in seiner Lage stabilisiert.

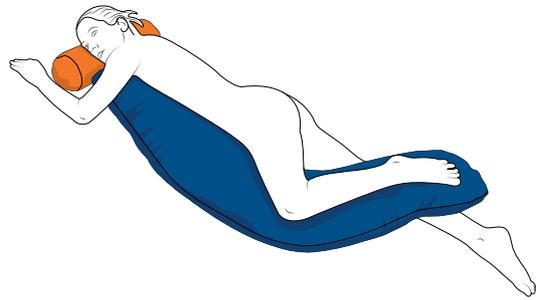

Universalkissen S, Zylinderkissen M, Universalkissen M

135°-Lagerung

Das Zylinderkissen M dient zur thorakalen Abstützung, die Beinpositionierung wird durch das Universalkissen gewährleistet. Ein Universalkissen S positioniert den Kopf.



DER KOPF



Ringkissen M

30°-Lagerung

Der Kopf sollte in Seitenlage so positioniert sein, dass sich die Wirbelsäule im Bereich der unteren Halswirbelsäule in Neutralstellung befindet.



Ringkissen M

in Rückenlage

In der Rückenlage wird der Kopf so positioniert, dass sich die Halswirbelsäule in Mittelstellung/ Neutralstellung befindet, der Hals aufliegt und unterstützt wird.



Ringkissen M

135°-Lagerung

Wenn der Kopf durch das Ringkissen sicher positioniert ist, kann sich der Pflegende mit beiden Händen der Bewegungsförderung des Patienten/ Bewohners widmen.




DER KOPF



Halbmondkissen M

Rückenlagerung

Das Halbmondkissen M positioniert Kopf und Schultern mit nur einem Kisselement in Rückenlage.

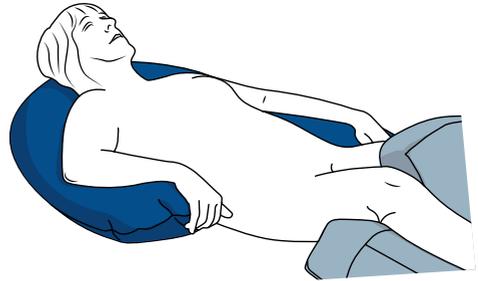

Universalkissen M

Rückenlagerung

(auch möglich für 30° - und 135° - Lagerung)


Kopf und Hals werden in Rückenlage mit dem Universalkissen M sicher und entspannt positioniert.



Semi-Fowler-Kissen M

Rückenlagerung


Das Semi-Fowler-Kissen verhindert wirksam die Überstreckung des Kopfes, und verbessert die Eigenwahrnehmung des zu Pflegenden.

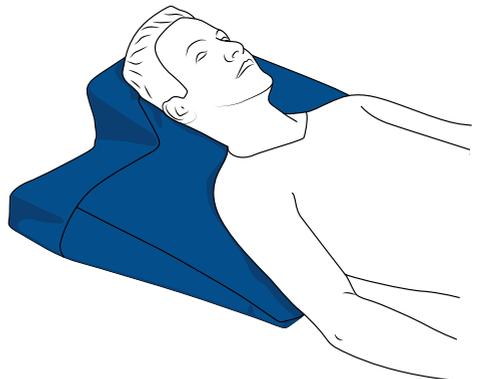




Zylinderkissen M

Die längliche Rollenform des Zylinderkissens bewirkt eine lagestabile Positionierung des Oberkörpers bei der 30°- und der 135°-Lagerung.

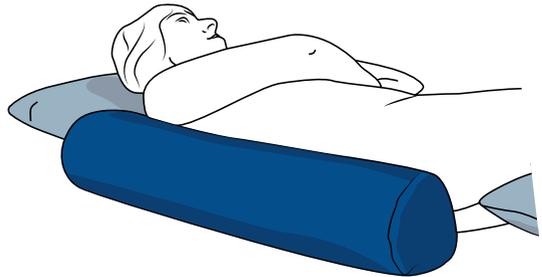

Universalkissen M


Das Universalkissen stützt den Oberkörper in der 30°-Lagerung sicher ab.

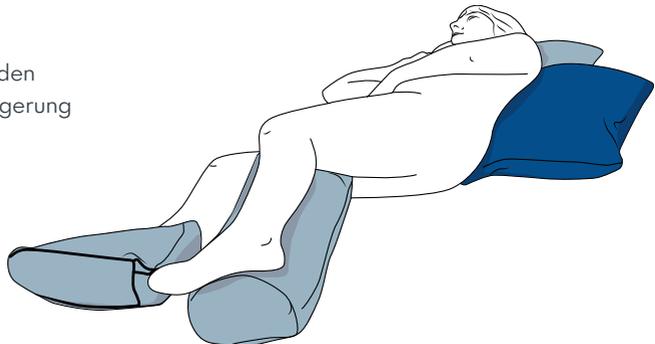




Deltakissen M

Das Deltakissen eignet sich aufgrund seiner triangulären Form gut zur thorakalen Abstützung bei der 30°-Seitenlagerung und der 135°-Lagerung.

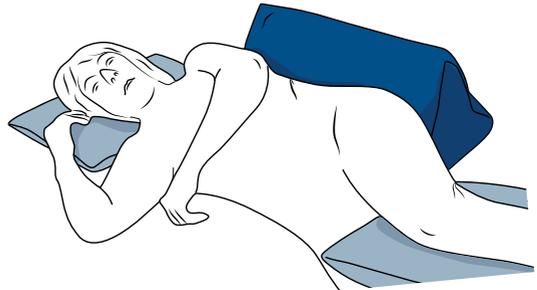

Universalkissen M

Das Universalkissen stützt den Oberkörper in der 135°-Lagerung sicher ab.

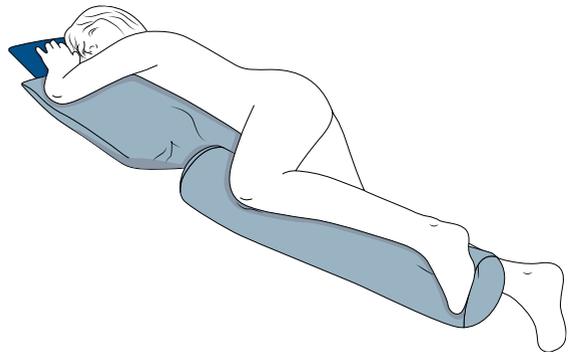

DIE ARME



Universalkissen S

Rückenlagerung


Der Ellenbogen wird physiologisch leicht gebeugt gelagert und der Unterarm wird geführt. Es ist zu beachten, dass auf den Ellenbogen bzw. Nervus ulnaris kein Druck ausgeübt wird.



Universalkissen S

30°-Lagerung

Der Arm wird möglichst in Neutralstellung positioniert, um Überstreckungen zu vermeiden.

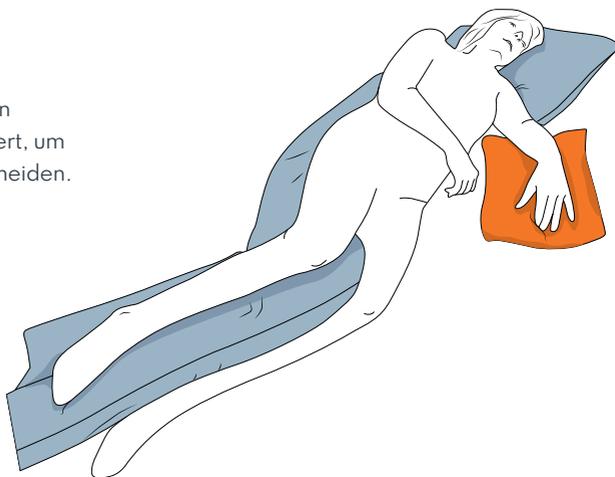

DIE ARME



Abduktionskissen S

Rückenlagerung


Eine kontrakturprophylaktische Abduktion des Oberarms zur Erreichung einer physiologischen Armpositionierung und Weichlagerung des Unterarmes wird durch das Universalkissen S erzielt.



Abduktionskissen M

Rückenlagerung

Das Abduktionskissen ermöglicht eine leicht erhöhte Führung des Unterarmes und ermöglicht die Freilagerung des Ellenbogens.

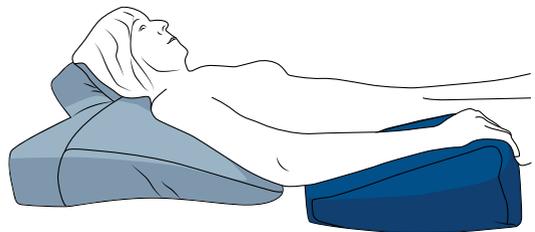

DIE BEINE

komplette untere Extremität

CAREPUR Beinpositionierung Basis+Modul

Rückenlagerung


Die Oberschenkel werden leicht erhöht geführt, der Kniebereich unterfüttert und der Sakralbereich entlastet. Das Unterschenkelmodul positioniert die Unterschenkel und gewährleistet die vollständige Entlastung der Fersen durch Freilagerung.



Semi-Fowler-Kissen M

Rückenlagerung

Das Semi-Fowler-Kissen im Bereich der Oberschenkel und Knie eingesetzt, unterfüttert diese und gewährleistet eine Abduktion im Kniebereich.

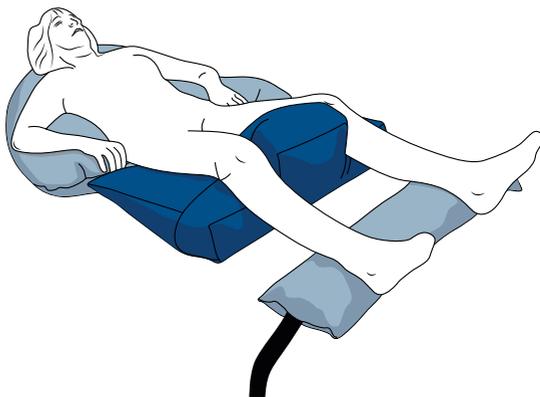

DIE BEINE


komplette untere Extremität



Halbmondkissen M

Rückenlagerung

Das Halbmondkissen positioniert Oberschenkel und Knie, fördert die Wahrnehmung im Bereich des Beckens und ermöglicht eine leicht erhöhte physiologische Armlagerung.

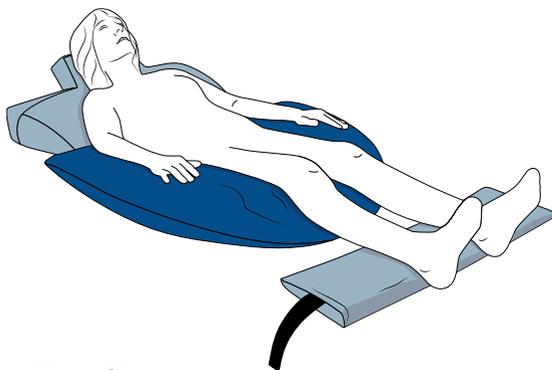

DIE BEINE


Knie



Deltakissen M

Rückenlagerung


Die trianguläre Form des Deltakissens bewirkt die Unterfütterung der Knie, die erhöhte Führung der Oberschenkel und entspannt so die Bauchdecke.

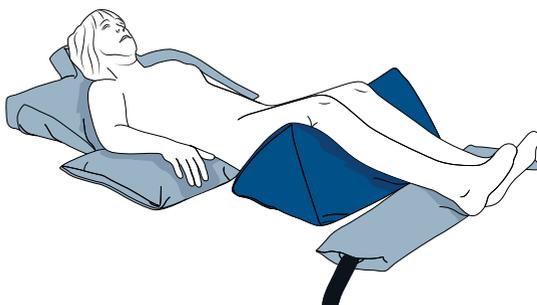

Zylinderkissen M

Rückenlagerung


Die Anwendung des Zylinderkissens unter den Knien verhindert eine Überstreckung der Beine und ermöglicht eine komfortable Beinpositionierung.

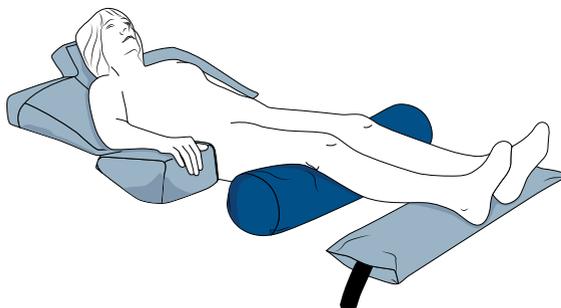

Universalkissen M in Verbindung mit Abduktionskissen M

Rückenlagerung

Das Universalkissen M unterfüttert die Knie und verhindert ein Überstrecken der Beine. Das Abduktionskissen verbessert die achsengerechte Beinführung und beugt Kontrakturen im Bereich der Knie vor.

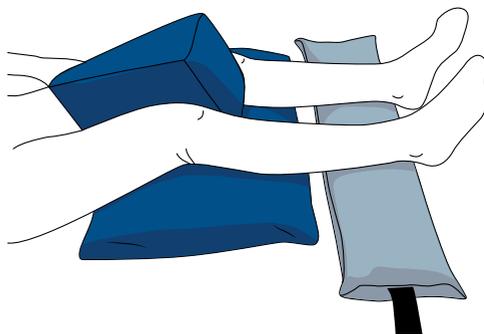

DIE BEINE

Knie



Universalkissen M

30°-Lagerung

Das Universalkissen zwischen den Knien verhindert das direkte Aneinanderliegen und bewirkt eine physiologische Beinstellung.



Universalkissen M, Universalkissen S

Rückenlagerung

Durch die Anwendungskombination beider Universalkissen kann eine komplette Beinlagerung mit Freilagerung der Fersen erreicht werden.



DIE BEINE


Unterschenkel



Universalkissen M

30°-Lagerung


Mit dem Universalkissen M wird ein Aneinanderliegen der Knieinnenseiten sicher verhindert und eine stabile Führung und Positionierung des oben liegenden Unterschenkels erreicht.

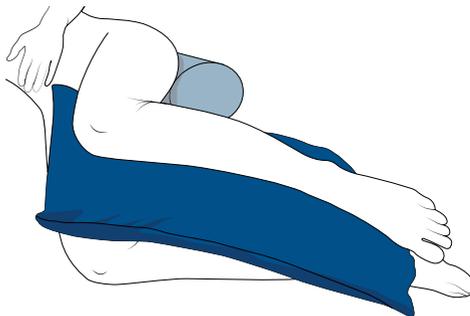

Zylinderkissen M

30°-Lagerung


Das rollenförmige Zylinderkissen positioniert das gesamte oben liegende Bein.

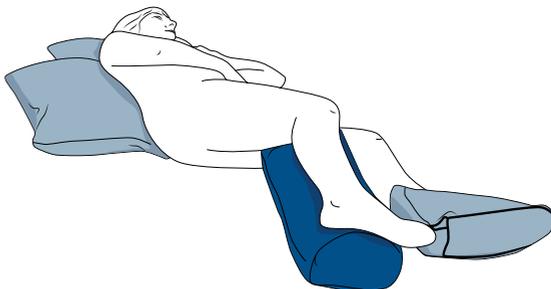

Beinpositionierung Kompakt

Rückenlagerung

Die Beine werden durch das Kissen erhöht und lagestabil positioniert, der venöse Rückstrom wird verbessert und die Fersen werden freigelagert.

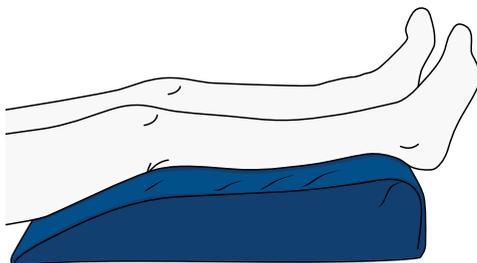

DIE BEINE


Unterschenkel



Semi-Fowler-Kissen M

Rückenlagerung


Das Semi-Fowler-Kissen sorgt für die Unterfütterung und Abduktion der Knie, führt die Unterschenkel und gewährleistet die Fersenfreilagern.

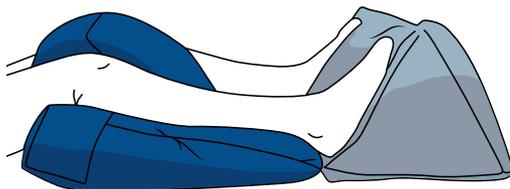

Universalkissen M

Rückenlagerung

Mit dem Universalkissen M kann auch ein Bein erhöht gelagert werden, um die dekubitusgefährdete Ferse druckentlastend freizulagern.

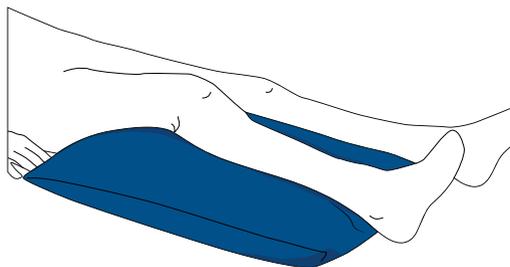

DIE BEINE

Unterschenkel



Zylinderkissen M

135°-Lagerung

Durch die Verwendung des Zylinderkissens im Bereich von Knie und Unterschenkel wird eine lagestabile Positionierung und eine Weichlagerung erreicht.



Universalkissen M

135°-Lagerung

Das Universalkissen M stützt Knie und Unterschenkel sicher.



DIE BEINE

Fersenfreilagerung



Fersenentlastungsgurt


Rückenlagerung, auch möglich für Seitenlagerung

Der Fersenentlastungsgurt kann unter der Matratze fixiert und somit gegen Verrutschen gesichert werden und dient zur Druckentlastung im Bereich der Fersen durch Freilagerung.



Fersenfreilagerung M

Das schuhförmige Kissen schützt innere und äußere Fußknöchel. Verstärkt unterfütterte Bereiche der Fußsohle und des Achillessehnenansatzes sorgen für eine Freilagerung der Ferse.

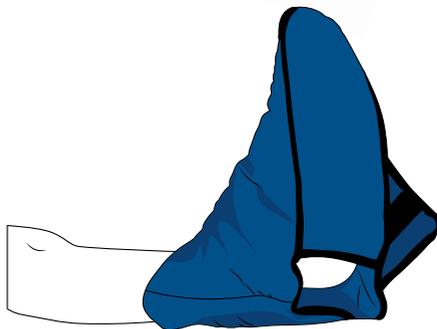

DIE BEINE


Fersenfreilagierung



Zylinderkissen M

Rückenlagerung

Das Zylinderkissen lagert in Anwendungskombination die Fersen frei.

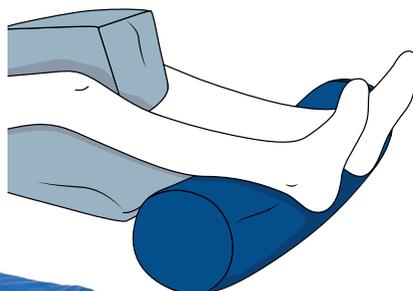

Semi-Fowler-Kissen M, Deltakissen M

Rückenlagerung

Die Anwendungskombination von Semi-Fowler-Kissen und Deltakissen ermöglicht ebenfalls eine effiziente Spitzfußprophylaxe durch Positionierung.



Die Mikrolagerung dient der physiologischen Positionsveränderung in den Gelenken sowie zur unterstützenden Lageveränderung durch Druckumverteilung an Kopf, Hals, Schultern, Thorax, Becken, Ober- und Unterschenkel oder im Fersenbereich.


Dazu wird das Kissen vollflächig unter der zu entlastenden Körperpartie platziert und dort für die Dauer von ca. 10-15 Minuten belassen. Danach wird es entfernt und an einer anderen zu entlastenden Körperregion eingesetzt.

Häufigkeit und Kontinuität in der Nachahmung physiologischer Bewegungsmuster durch kleinste Schwerpunktverlagerungen sind von entscheidender Bedeutung, um eine dekubitusprophylaktische Wirkung zu erzielen und die Verbesserung der natürlichen Blutzirkulation im Gewebe zu gewährleisten.

Mikrolagerungskissen

Rückenlagerung

Druckänderungen in den betreffenden Körperarealen durch kleinste Schwerpunktverlagerungen.

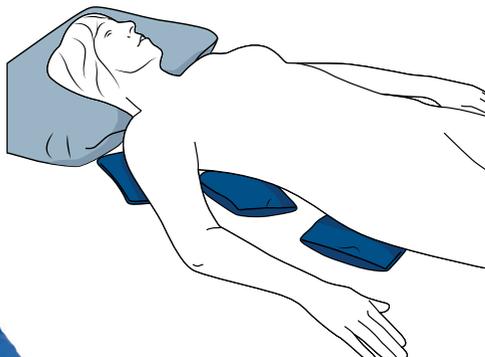



Mikrolagerungskissen

Rückenlagerung

Physiologische Positionsveränderung im Knie- und Sprunggelenksbereich.



Mikrolagerungskissen

Rückenlagerung

Unterstützende
Lageveränderung im Bereich
der Schulter, des Beckens und
des Unterschenkels.



Anwendungsbeispiel

Mikrolagerungskissen zur zeitlich
begrenzten Druckumverteilung


CAREPUR-Lagerungskissen dienen ebenfalls zur Positionierungsunterstützung bestimmter Körperareale durch Anwendung im Rollstuhl bzw. bei allgemeinen Sitzpositionen.

Hemi-Armkissen M

im Rollstuhl

Das spezielle zweiteilige **CAREPUR** Hemi-Armkissen ermöglicht die individuelle Positionierung eines paretischen Armes im Rollstuhl. Der komplette Unterarm und der Ellenbogen werden weichgelagert und sinken leicht in die Kissenstruktur ein.

Es entlastet wirksam durch Reduzierung der Zugkräfte das betreffende Schultergelenk. Beide Teile des Kissens werden sicher durch Klettband miteinander verbunden und ermöglichen eine individuelle Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten.

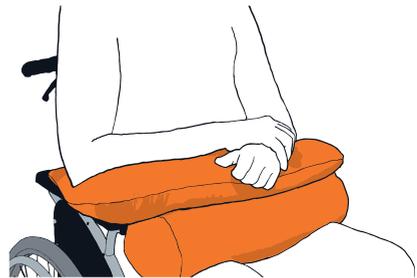



Semi-Fowler-Kissen S

im Rollstuhl

Das Semi-Fowler-Kissen ermöglicht bei nebenstehender Anwendung ebenfalls die sichere und druckentlastende Positionierung eines Armes und gewährleistet gleichzeitig eine Abduktion im Kniebereich zur Reduzierung des Druckrisikos durch aneinanderliegende Knieinnenseiten.



Abduktionskissen S

im Rollstuhl

Das Abduktionskissen dient der seitlichen Wegführung bzw. dem Abspreizen einer Extremität von der Körpermitte. Es trägt so zu einer physiologischen Beinstellung bei und verhindert das kontrakturbedingte Aneinanderliegen der Knie.



PRODUKT ÜBERSICHT



Textilbezug

Bezüge zu den CAREPUR-Artikeln



Farbe Bestellnr. Bezeichnung

| Farbe | Bestellnr. | Bezeichnung |
|-------|------------|--|
| | B43835 | Textilbezug blau für Universalkissen 2 Stück |
| | B43834 | Textilbezug blau für Hemi-Armkissen S |
| | B43833 | Textilbezug blau für Hemi-Armkissen M |
| | B43832 | Textilbezug blau für Abduktionskissen S |
| | B43831 | Textilbezug blau für Abduktionskissen M |
| | B43830 | Textilbezug blau für Zylinderkissen S |
| | B43829 | Textilbezug blau für Zylinderkissen M |
| | B43828 | Textilbezug blau für Ringkissen S |
| | B43827 | Textilbezug blau für Ringkissen M |
| | B43826 | Textilbezug blau für Semi-Fowler-Kissen S |
| | B43825 | Textilbezug blau für Semi-Fowler-Kissen M |
| | B43824 | Textilbezug blau für Seitenlagerungskissen S |
| | B43823 | Textilbezug blau für Seitenlagerungskissen M |
| | B43822 | Textilbezug blau für Halbmondkissen S |
| | B43821 | Textilbezug blau für Halbmondkissen M |
| | B43820 | Textilbezug blau für Deltakissen S |
| | B43819 | Textilbezug blau für Deltakissen M |
| | B43818 | Textilbezug blau für Universalkissen S |
| | B43817 | Textilbezug blau für Universalkissen M |



- Bezüge sind mit einem Reißverschluss ausgestattet
- Elastisch, strapazierfähig und knitterfrei
- Geräuscharm und sehr geschmeidig
- Wasserdampfdurchlässig
- Pflegeleicht, waschbar bis 60° C
- Trocknergeeignet bei niedrigen Temperaturen

PRODUKT ÜBERSICHT



Seitenlagerungskissen


HMV-Nummer: 11.11.05.2002

| | Bestellnr. | Größe in cm |
|---|-----------------|-------------|
| M | P43800 | 180 x 31 |
| M | P43801 (Medium) | 180 x 31 |
| S | P43799 | 142 x 26 |



Details

- körperlanges, s-förmiges Kissen zur kompletten seitlichen Positionierung
- anatomische Vorformung erleichtert die Anwendung
- die körperorientierten Rundungen reduzieren die Faltenbildung des Kissens

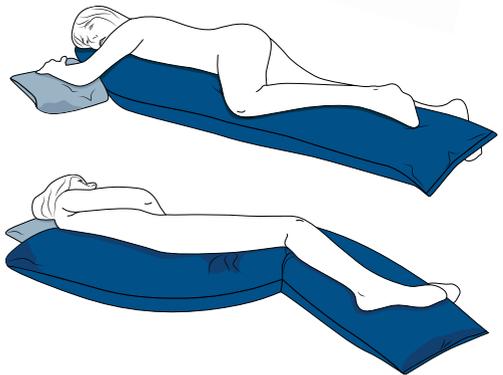

Anleitung zur Positionierung in 30°-Seitenlagerung

- Patient/Bewohner auf gewünschte Seite drehen
- Kissen so aufschütteln, dass sich die Mehrzahl der Polystyrolkügelchen auf einer Seite befindet
- pralle Seite im Bereich der Schulter und entsprechend der Körperform anlegen (leere Seite zeigt Richtung Füße)
- Polystyrolkügelchen leicht mit beiden Händen individuell vom Kopf- in Richtung Fußende bewegen und anmodellieren, auf Stützung des Beckens, Abduktion der Knie und Freilagerung der Ferse achten
- Patienten/Bewohner zurück auf das Kissen drehen, Liegeposition prüfen und ggf. anpassen (Kopf, Schulter, Becken, Knie und Fuß)

PRODUKT ÜBERSICHT



Universalkissen

HMV-Nummer: 11.11.05.0011

| | Bestellnr. | Größe in cm |
|---|------------|-------------|
| M | P43772 | 60 x 40 |
| L | P43773 | 70 x 50 |
| S | P43771 | 45 x 30 |



Deltakissen

HMV-Nummer: 11.11.05.1013

| | Bestellnr. | Größe in cm |
|---|------------|-------------|
| M | P43794 | 60 x 40 |
| S | P43793 | 42 x 25 |



Halbmondkissen

HMV-Nummer: 11.11.05.1014

| | Bestellnr. | Größe in cm |
|---|------------|-------------|
| M | P43796 | 180 x 31 |
| S | P43795 | 142 x 25 |



PRODUKT ÜBERSICHT



Semi-Fowler-Kissen


HMV-Nummer: 11.11.05.1015

| | Bestellnr. | Größe in cm |
|---|------------|--------------|
| M | P43798 | 65 x 50 x 15 |
| S | P43797 | 50 x 35 x 13 |



Details


- u-förmiges Kissen mit erhöhtem Mittelteil
- multifunktional zur Lagerung verschiedener Körperbereiche anwendbar

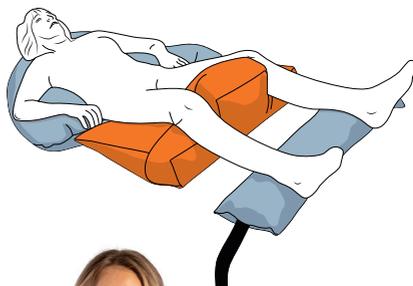

George Ryerson Fowler (1848-1906)

brit. Arzt, erkannte, dass Positionen mit aufgerichtetem Oberkörper im Krankenbett die Atmung erleichtern.

Semi-Fowler-Position: Erhöhung des Oberkörpers um 15-30°

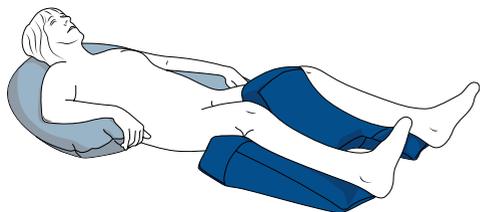

PRODUKT ÜBERSICHT



Zylinderkissen

HMV-Nummer: 11.11.05.0014

| | Bestellnr. | Größe in cm |
|----------|----------------|-------------|
| M | P43779 | 70 x 17 |
| | P43780 (2 St.) | 31 x 17 |
| S | P43778 | 45 x 14 |



Ringkissen

HMV-Nummer: 11.11.05.0013

| | Bestellnr. | Größe in cm |
|----------|------------|-------------|
| M | P43777 | 130 x 20 |
| S | P43776 | 106 x 15 |



Abduktionskissen

HMV-Nummer: 11.11.05.0015

| | Bestellnr. | Größe in cm |
|----------|------------|--------------|
| M | P43807 | 30 x 15 x 21 |
| S | P43806 | 23 x 12 x 18 |



PRODUKT ÜBERSICHT



Fersenfreilagerung

HMV-Nummer: 11.11.05.0016


Bestellnr.

| | |
|---|--------|
| M | P43784 |
| S | P43783 |




Details

- schuhförmiges, direkt am Fuß platziertes Kissen mit Hohlfaserfüllung
- Freilagerung der Ferse durch verstärkt unterfütterte Bereiche der Fußsohle und des Achillessehnenansatzes
- Schutz der inneren und äußeren Fußknöchel durch Weichpolsterung
- beidseitig anwendbar
- variabel für mehrere Schuhgrößen einsetzbar dank des Klettverschlusses (orange = bis Größe 37, blau = ab Größe 38)

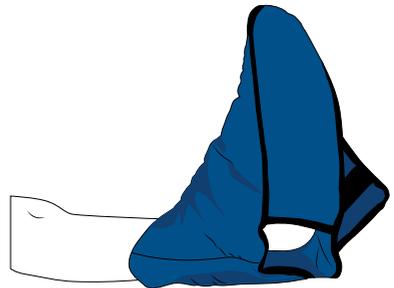

Hinweise

- Wir empfehlen die zusätzliche Verwendung von Socken!
- Das Produkt ist nicht zum Laufen geeignet.

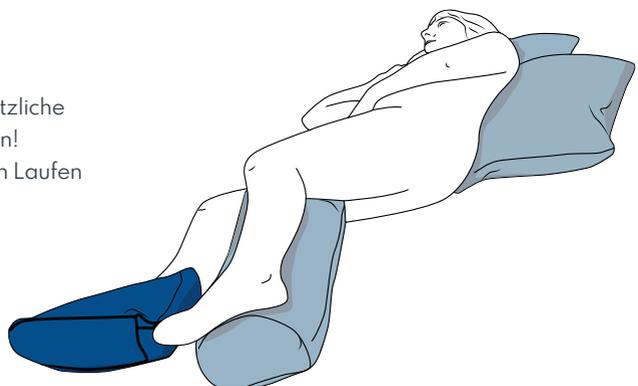

PRODUKT ÜBERSICHT



Fersenentlastungsgurt

HMV-Nummer: 11.11.05.0012

| | Bestellnr. | Größe in cm |
|--|------------|-------------|
| | P43792 | 90 x 15 |



Hemi-Armkissen

HMV-Nummer: 11.11.05.0017

| | Bestellnr. | Größe in cm |
|---|------------|--------------------|
| M | P43786 | 58 x 36 + 48 x 16Ø |
| S | P43785 | 45 x 30 + 30 x 13Ø |



PRODUKT ÜBERSICHT





Rückenlagerungskissen

HMV-Nummer: 11.11.05.2007

| | Bestellnr. | Größe in cm |
|----------|------------|-------------|
| M | P43803 | 200 x 60 |
| S | P43802 | 140 x 45 |

Details

- körperlanges π -förmiges Kissen
- Weichlagerung, Unterfütterung und Positionierung des gesamten Körpers mit nur einem Kissen
- Freilagerung individuell definierter Körperbereiche zur lokalen Druckreduzierung
- Modellierung am Körper bewirkt eine somatische Stimulation, verbessert die Körperwahrnehmung und folgt so dem Konzept der Basalen Stimulation

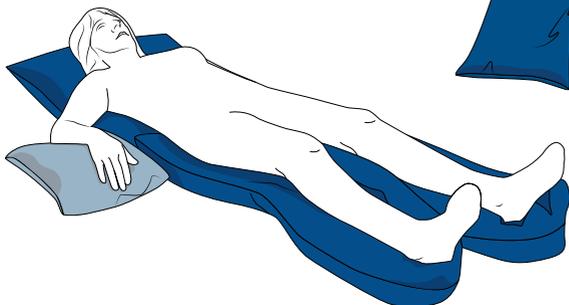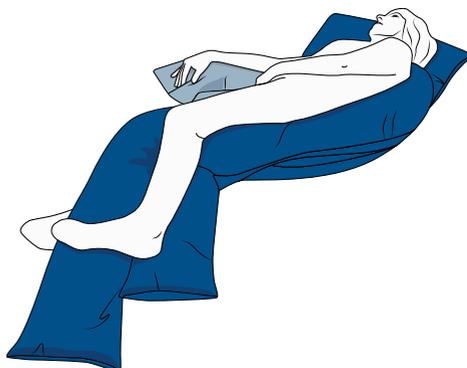

PRODUKT ÜBERSICHT

Mikrolagerung



| Bestellnr. | Größe in cm |
|----------------|-------------|
| P43811 (3 St.) | 30 x 17 |
| P43810 | 30 x 17 |



Universallagerungsset

3-teilig von CAREPUR

| Bestellnr. | Beschreibung | HMV-Nummer |
|-----------------|---|---------------|
| P43812 | Universallagerungsset bestehend aus: | |
| M P43772 | Universalkissen M | 11.11.05.0011 |
| S P43771 | Universalkissen S | 11.11.05.0011 |
| M P43800 | Seitenlagerungskissen M | 11.11.05.2002 |



PRODUKT ÜBERSICHT



CAREPUR Beinpositionierung Basis + Modul

HMV-Nummer: 11.11.05.0038

| Bestellnr. | Beschreibung | Größe in cm |
|---------------|---------------------------------------|----------------|
| P43787 | CAREPUR Beinpositionierungsset | |
| P44455 | Basiskeil | 58 x 55 x 12 |
| P44456 | Unterschenkelmodul | 50 x 21 x 10,5 |



PRODUKT ÜBERSICHT



CAREPUR Beinpositionierung Kompakt

| | Bestellnr. | Beschreibung | Größe in cm |
|----------|------------|------------------------------|--------------|
| M | P44457 | Beinpositionierung Kompakt M | 58 x 55 x 12 |
| S | P43789 | Beinpositionierung Kompakt S | 58 x 40 x 10 |



PRODUKT ÜBERSICHT



CAREPUR Positionierungsset I

HMV-Nummer: siehe Tabelle

| | Bestellnr. | Beschreibung | HMV-Nummer |
|----------|---------------|--|---------------|
| | P43809 | CAREPUR Positionierungsset I – 7-teilig, bestehend aus: | |
| M | P43772 | Universalkissen M | 11.11.05.0011 |
| M | P43784 | Fersenfreilagerung M | 11.11.05.0016 |
| M | P43796 | Halbmondkissen M | 11.11.05.1014 |
| S | P43776 | Ringkissen S | 11.11.05.0013 |
| S | P43778 | Zylinderkissen S | 11.11.05.0014 |
| M | P43800 | Seitenlagerungskissen M | 11.11.05.2002 |
| | P43814 | Transporttasche blau | - |



PRODUKT ÜBERSICHT



CAREPUR Positionierungsset II

HMV-Nummer: siehe Tabelle

| | Bestellnr. | Beschreibung | HMV-Nummer |
|----------|---------------|---|---------------|
| | P43808 | CAREPUR Positionierungsset II – 7-teilig, bestehend aus: | |
| S | P43771 | Universalkissen S | 11.11.05.0011 |
| M | P43798 | Semi-Fowler-Kissen M | 11.11.05.1015 |
| M | P43786 | Hemi-Armkissen M | 11.11.05.0017 |
| M | P43794 | Deltakissen M | 11.11.05.1013 |
| M | P43792 | Fersenentlastungsgurt | 11.11.05.0012 |
| M | P43800 | Seitenlagerungskissen M | 11.11.05.2002 |
| | P43813 | Transporttasche orange | - |



weitere PRODUKTE



In unserem Sortiment finden Sie viele weitere Produkte zur Dekubitusprophylaxe und -therapie. Hier einige Beispiele aus den Bereichen Liegen und Sitzen.

DEKULAST BASIC

HMV-Nummer: 11.29.05.0052

Antidekubitusmatratze mit guten Komforteigenschaften bei hoher Gewichtsbelastung, bestehend aus 7-Zonen-HR Schaumstoffkern und PU-Weichlagerungsliegefläche. Die Randzone mit Duplexschnitt erleichtert die Mobilisierung und dient der Sturzprophylaxe.



DEKUCARE VISCO

HMV-Nummer: 11.29.05.0041


Matratze mit hohem Liegekomfort durch Kombination von PU-Schaumstoffkern mit Längs- und Quereinschnitten und viscoelastischer Liegefläche, die eine hohe Punktelastizität zur genauen Anpassung an die Körperkonturen aufweist und die Durchblutung des gesamten Körpers verbessert.



CARFLEX

HMV-Nummer: 11.29.05.1004

Punktelastische Matratze mit weicher atmungsaktiver Würfelstruktur der Liegefläche. Diese passt sich gut an die Körperkonturen des Patienten an und schafft ein angenehmes Liegegefühl.

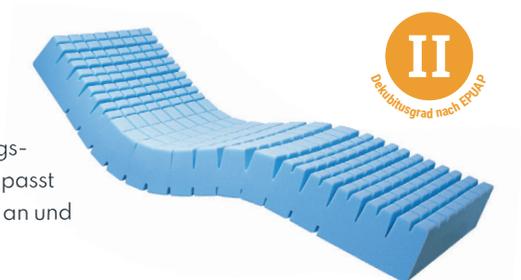

weitere PRODUKTE

VISCOLUX

HMV-Nummer: 11.39.01.1025

Das viscoelastische Sitzkissen aus Schaumstoff mit Formgedächtnis und anatomisch vorgeformter Sitzfläche ermöglicht die exakte Anpassung an die Körperkonturen des Patienten/Bewohners und gewährleistet einen hohen Sitzkomfort bei guter Druckentlastung.



CUBE GEL

HMV-Nummer: 11.39.02.1007


Das Kissen mit würfelartiger, strukturierter Sitzfläche zur Dekubitusprophylaxe & -therapieunterstützung besteht aus elastischem Polyetherschaumstoff und hat eine Freilagerungskontur welche mit einer Weichgel-Einlage im Bereich der Sitzbeinhöcker unterfüttert ist. Die unterschiedlich hohen Schaumstrukturen ermöglichen eine komfortable Sitzposition, eine Führung der Oberschenkel und die konturgenaue Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten.



CUBE FLEXI

HMV-Nummer: 11.39.01.3014

Das Sitzkissen besteht aus elastischem Polyetherschaumstoffrahmen mit reversiblen und einzeln austauschbaren bzw. herausnehmbaren, würfelartigen Elementen in zwei Höhen, aus drei verschiedenen Schaumqualitäten.

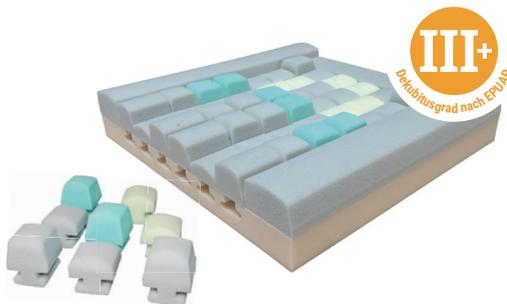

Fremdwortverzeichnis

| | |
|---|--|
| 30° -Lagerung: | halbseitige Anhebung einer Körperhälfte in Rückenlage |
| 135° -Lagerung: | halbseitige Anhebung einer Körperhälfte in Bauchlage |
| Abduktion: | Bewegung von der Körpermitte weg, Spreizen |
| Basale Stimulation: | Konzept zur Anregung und Förderung der Wahrnehmung des eigenen Körpers |
| Dekubitus: | Wundliegegeschwür |
| Hemiparese: | (unvollständige) halbseitige Lähmung |
| Inkontinenz: | ungewolltes Ausscheiden von Körperflüssigkeiten |
| Kontraktur: | Bewegungseinschränkung durch Verkürzung von Muskeln, Sehnen, Bändern und Faszien |
| Nervus ulnaris: | Ellbogennerv („Musikantenknochen“) |
| paretisch/Parese: | (unvollständig/e) gelähmt/Lähmung |
| physiologisch(e Positionierung): | normale, natürliche Körperhaltung |
| Prophylaxe/prophylaktisch: | Vorsorge/vorsorglich |
| Sakralbereich: | Körperbereich um das Kreuzbein (unterster Teil der Wirbelsäule) |
| somatisch: | körperlich, den Körper betreffend |
| Thorax/thorakal: | Brustkorb/den Brustkorb betreffend |
| triangulär: | dreieckig |
| venös: | die Venen betreffend |
| vestibulär: | den Gleichgewichtssinn betreffend |

REINIGUNGSHINWEISE, MATERIAL, IMPRESSUM



Bezug: bi-elastisches Polyamidgewebe (45 %) mit antibakterieller Polyurethanbeschichtung (55 %)

Füllung: 100 % Polystyrolkugeln

Eigenschaften: flüssigkeits-, bakterien-, milben- und virendicht, atmungsaktiv (wasserdampfdurchlässig), abwaschbar, wischdesinfizierbar sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette

Reinigung/ Desinfektion: Kann bei Bedarf mit haushaltsüblichen Mitteln gereinigt und durch Abwischen mit einem desinfektionsmittelgetränkten Tuch vom Anwender wischdesinfiziert werden.

Pflege: Bitte chlorfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel benutzen.


Die Gebrauchshinweise der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind unbedingt zu beachten!

Herzlich willkommen im SHP-Shop

Nutzen Sie die komfortable Bestellmöglichkeit für unser umfangreiches Produktfolio zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung sowie Zubehör.

Dieser B2B-Shop richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler und öffentliche Institutionen. Kein Verkauf an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB.

www.s-h-p.eu

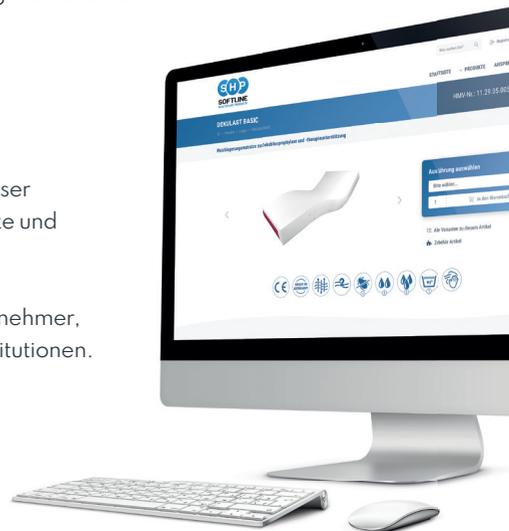

Impressum

Positionierungsratgeber

Informationen für Pflegekräfte und
pflegende Angehörige (Version: 06/2023)

Herausgeber:

SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG

Lebbiner Weg 1

15859 Storkow (Mark)

Germany

Telefon: +49 33678 - 40 77 00

Telefax: +49 33678 - 40 77 29

E-Mail: info@s-h-p.eu

Web: www.s-h-p.eu

USt-IdNr.: DE202767024

